



PARI COMPACT

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Компания **PARI GmbH**, в год своего 110-летнего юбилея стала, уже во второй раз с 2010 года, обладателем престижного Знака «Бренд столетия» в области создания приборов для ингаляционной терапии в Германии



PARI COMPACT – компрессорный ингалятор с небулайзером **PARI LC PLUS** для распыления лечебных растворов предназначенных для небулайзерной терапии и физиологического раствора поваренной соли для увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PARI COMPACT компрессор тип 052, небулайзер **PARI LC PLUS**, мундштук с клапаном выдоха, детская маска, трубка-воздуховод, шнур питания, инструкция по использованию

Номер заказа 052G1019

Технические данные:

Переменный ток	220 В/50 Гц
Давление	1.0 бар
Вес	1.2 кг
Размеры (ДхШхВ)	14 x 10 x 16 см
Гарантия	2 года

Характеристика аэрозоля:

Средний размер частиц	3,9 мкм
Общий выход аэрозоля	418 мг\мин
Массовая доля частиц менее 5 мкм	64%

Измерено с помощью Mastersizer X при t=23° C, 50% влажности, моделированный инспираторный поток 20 л/мин

- Бронхиальная астма
- ХОБЛ
- Бронхиты
- Сезонные аллергические заболевания дыхательных путей
- В период отказа от курения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:



Небулайзер **PARI LC SPRINT® XLent**
Для верхних дыхательных путей

Фарингиты, ларингиты, синдром крупа и постинтубационный синдром, реабилитация после операции на области глотки и гортани. Производит крупнодисперсный аэрозоль 7-8 мкм

номер заказа
023G1801



Небулайзер **PARI LC SPRINT® Tracheo**
Для ингаляции через трахеостому

С трахеoadаптером на базе небулайзера **PARI LC SPRINT®** с синей насадкой

номер заказа
023G1080



Небулайзер **PARI COMPACT**
Комплект ежегодной замены

В составе: небулайзер **PARI LC PLUS**, мундштук с клапаном выдоха, трубка-воздуховод, фильтр для компрессора, держатель фильтра

номер заказа
022G5210



Дыхательный тренажер **PARI PEP I**
Для улучшения отхождения мокроты

Дыхательный тренажер с изменяемым сопротивлением выдоху. Возможно совмещение ингаляции и дыхательной тренировки

номер заказа
018G6100

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краткое руководство

Подготовка и проведение небулайзерных ингаляций с помощью распылителей **PARI LC PLUS**

1



Перед каждой ингаляцией тщательно вымойте руки.

2



Возьмите чистый сухой небулайзер. Отсоедините верхнюю крышку с клапаном вдоха от небулайзера.


3



Возьмите емкость с лекарством. Поместите необходимое количество медикамента в камеру небулайзера.

Важно!
Для ингаляции используйте только те медикаменты, которые назначил врач.


4

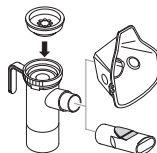

Вновь присоедините крышку к небулайзеру. Присоедините также к небулайзеру мундштук или маску.

Важно! Существует несколько разных масок к небулайзеру **PARI LC PLUS** (маска детская и взрослая жесткая из пластмассы, **PARI SMART** маска для взрослых из силикона, **PARI BABY** маска из силикона с переходником).

5

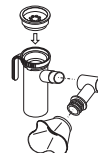

Для маски **PARI BABY** используйте специальный переходник, позволяющий изменять позицию маски в зависимости от положения ребенка (лежа или сидя).

6



Сядьте прямо и удобно, откинувшись на спинку стула, кресла или перед столом, опершись локтями на стол.

7



Включите прибор. Начинайте ингаляцию сразу после появления аэрозоля из небулайзера.

8



Поместите мундштук между зубами и плотно обхватите мундштук губами. Язык не должен препятствовать выходу аэрозоля. При использовании маски следите, что она покрывает нос и рот.

9



Положение небулайзера должно быть вертикальным. Маленьким детям накладывайте с легким нажатием маску на нос и рот. Контролируйте дыхание ребенка.

10



Делайте медленный спокойный вдох и выдох через мундштук или маску без усилий с короткой паузой в конце вдоха. Изменение звука работы небулайзера означает полное распыление медикамента.

Гигиена и содержание небулайзеров **PARI LC PLUS** в домашних условиях


1



Очистка

- Разберите небулайзер на составляющие части.
- Промойте части небулайзера горячей водой с добавлением моющего средства.
- Промойте части небулайзера под проточной водой.


2

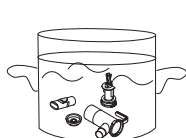

Дезинфекция

- Небулайзер можно дезинфицировать в достаточном количестве кипящей воды в течение 15 минут.
- ИЛИ
- В дезинфекторе (например, для детских бутылочек).


3

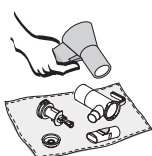

Высушивание

- При использовании дезинфектора высушивание не требуется, небулайзер может храниться в корзине прибора до следующего использования.
- Высушивание при комнатной температуре в течение 4 часов.
- Высушивание с помощью бытового фена.

4

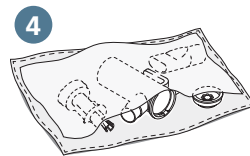

Хранение

- Завернутым в чистую, проглаженную неволокнистую салфетку или полотенце.

5



Содержание небулайзера

Небулайзер **PARI LC PLUS** трубка-воздуховод, фильтр для компрессора могут использоваться в течение 1 года, после чего подлежат замене.
Важно! В комплект ежегодной замены **PARI LC PLUS** входит:
Небулайзер;
Трубка-воздуховод;
Фильтр для компрессора.



PARI Сервисный центр:
techsupport@parinebuliser.ru; +7 (495) 981 88 60

ООО "ПАРИ синергия в медицине"
117418, Москва, а/я 16
тел./факс: +7 (495) 981 88 60, +7 (499) 128 98 27
e-mail: sales@parinebuliser.ru, info@pari.de
www.pari.de, www.parinebuliser.ru

On-line консультации,
заказ в интернет магазине
и услуга «обратный звонок»
доступны на нашем сайте
www.parinebuliser.ru

